

Gel mờ sẹo

FastHealz

Scar

1. Thành phần:

Cyclopentasiloxane, dimethicone, dimethicone crosspolymer, PEG-10 dimethicone, silicone dioxide, dexpanthenol, glycerin.

2. Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 12g.

3. Mục đích sử dụng:

- Dưỡng ẩm, làm mềm dịu da.
- Sản phẩm dùng được cho da mặt và các vị trí da khác trên cơ thể: giúp hạn chế hình thành và làm mềm, làm mờ các loại sẹo: lồi, phì đại, sau mổ, bỏng.
- Giúp giảm tình trạng ngứa, đỏ do kích ứng.

4. Hướng dẫn sử dụng:

- Sản phẩm dùng được cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn.
- Sử dụng ngay khi vết thương bắt đầu liền để hạn chế hình thành sẹo.

Các bước sử dụng:

Bước 1: Rửa sạch vùng da bị tổn thương và để khô.

Bước 2: Lấy 1 lượng nhỏ gel mờ sẹo Fasthealz Scar thoa đều, mỏng, lan rộng toàn vùng sẹo.

Bước 3: Chờ 1 - 2 phút để gel thẩm thấu vào da. Sau khi da đã khô, có thể dùng các loại mỹ phẩm khác.

** Sử dụng 3 - 4 lần/ngày và liên tục từ 2 - 6 tháng tùy theo mức độ của sẹo để đạt hiệu quả tốt nhất.*

** Không dùng cho vết thương hở hoặc ướt.*

5. Cảnh báo thận trọng:

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

6. Bảo quản: Trong bao bì kín, tránh ánh sáng trực tiếp, không quá 30°C.

7. Hạn dùng: Xem trên nhãn hộp.



Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:
CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
(Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, P. Hoàng Đông, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam)



Free hotline

1800 255525



0866 832 663