

Xịt giảm nghẹt, thông mũi



Alegin

FreeNose Kid

Giới thiệu:

Xịt giảm nghẹt, thông mũi **Alegin FreeNose kid** là dung dịch muối ưu trương 1,3%, phối hợp cùng Allantoin và Hypromellose, được sử dụng để làm sạch, thông thoáng mũi, rửa trôi dịch tiết mũi một cách tự nhiên từ đó giúp thông mũi, giảm nghẹt mũi, sổ mũi, đồng thời góp phần duy trì độ ẩm cho mũi. Phù hợp sử dụng trong các trường hợp viêm đường hô hấp trên, viêm mũi, viêm xoang, cảm cúm, viêm mũi dị ứng.

Nồng độ muối ưu trương phù hợp cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

Hướng dẫn sử dụng:

Thành phần:

Natri clorid, Allantoin, Hypromellose và phụ liệu vừa đủ.

Quy cách:

Hộp 1 lọ 20 ml.

Mục đích sử dụng:

- Làm sạch thông thoáng mũi
 - Hỗ trợ giảm sung huyết, phù nề niêm mạc mũi, giúp thông mũi, cải thiện tình trạng nghẹt mũi, sổ mũi.
 - Dưỡng ẩm, bảo vệ và làm dịu khô rát niêm mạc mũi.
- Phù hợp trong các trường hợp viêm đường hô hấp trên, viêm mũi, viêm xoang, cảm cúm, viêm mũi dị ứng.

Chống chỉ định:

- Không dùng cho người quá mẫn với một trong các thành phần của sản phẩm.

Cảnh báo thận trọng:

- Có thể có cảm giác nóng và ngứa mũi nhẹ khi sử dụng lần đầu, điều này là bình thường và sẽ biến mất sau 10-20 giây sau khi xịt.

Hướng dẫn sử dụng:

Xịt 1-2 lần mỗi bên mũi, có thể dùng nhiều lần mỗi ngày (không quá 5 lần). Không dùng liên tục quá 10 ngày. Việc sử dụng có thể được lặp lại nhiều lần trong năm, tuy nhiên nên dùng cách ít nhất 1 tuần cho mỗi chu kỳ. Dùng được cho trẻ từ 6 tháng tuổi.

Cách dùng:

- Khi sử dụng lần đầu, cần xịt ra ngoài không khí để nạp dịch đến khi đạt được dạng xịt đồng nhất. Tác dụng này kéo dài 24 giờ. Nếu sau 24 giờ mới dùng liều tiếp theo, dịch phải được nạp lại. Lần này, chỉ cần xịt 1 nhát vào không khí là đủ.
- + Mở nắp bảo vệ.
 - + Cắm lọ thẳng hướng lên.
 - + Đặt đỉnh lọ vào lỗ mũi và xịt theo liều chỉ định. Tương tự, xịt dung dịch vào bên mũi còn lại.
 - + Đậy nắp bảo vệ.

Bảo quản:

Để nơi khô mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng:

Xem trên mặt ngoài nhãn hộp.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVOPHARM - NHÀ MÁY GMP DƯỢC PHẨM

Lô CN05, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, Phường Duy Hà,

Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam



T1-1-080426

M00099